

eakin dot®

2-teiliges planes System
mit 60-mm-Ring

Wählen Sie die eakin dot® 2-Teiler bei High-Output-Stoma

4 Gründe, die dafürsprechen:

1. Höheres Maß an Patientensicherheit und Komfort^{1,2}
2. Hautfreundlicher *skinsmart™* Hydrokolloid für längere Tragezeit^{1,2}
3. Deutliche Verbesserung des peristomalen Hautzustandes^{1,2}
4. Reduzierter Bedarf an Pflegeressourcen²

Fallbericht von:

Marieke Muller, Stomatherapeutin,
Tergooi-Spital, Hilversum, Niederlande

1. Anwenderberichte zu eakin dot® 2-teiliger Stomaversorgung. Daten liegen vor. 2017–2019
2. Fallbericht von Stomatherapeut zu eakin dot® 2-teiliger Stomaversorgung. Daten liegen vor. 2019

eakin dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE

Krankengeschichte:

- **Januar 2019:** Notoperation (offene rechtsseitige Hemikolektomie mit endständiger Ileostomie) nach tumorbedingtem Darmverschluss.
- High-Output-Stoma.
- **Februar 2019:** Mit 2-teiligem High-Output-Klebesystem nach Hause entlassen.
- Gesunde Haut. Wechselt Basisplatte 2-mal wöchentlich und Beutel 1-mal täglich.
- Versorgt sein Stoma eigenständig.



Probleme/Einschätzung der Pflegekraft:



10. April 2019: Vor Verwendung der planen eakin dot® 2-Teiler

- **3. April 2019:** Viele Rückstände und gerötete Haut.
- Leerung 5- bis 7-mal täglich.
- Basisplatte unterlaufen.
- Will nur ungern Produkt wechseln, weil er mit dem Auslass des aktuellen Beutels zufrieden ist.
- Dem Patienten wird empfohlen, die Basisplatte 3-mal wöchentlich und den Beutel 1-mal täglich zu wechseln. Behandlung der Haut mit Hautschutzcreme und Entfernung der Rückstände mit eakin release™ Pflasterentferner-Tüchern. Beurteilung nach einer Woche.
- **10. April 2019:** Haut ist gerötet und juckt.

Pflegekraft empfiehlt eakin dot® 2-teiliges planes System

- Empfehlung eines Wechsels zu planem eakin dot® 2-Teiler mit vorgestanzter 27,5-mm-Basisplatte und Maxi-Beutel sowie zu Beendigung der Hautschutzcreme-Anwendung.
- Die Basisplatte sollte 2-mal wöchentlich, der Beutel 1-mal täglich gewechselt werden.
- Erneute Beurteilung nach 2 Wochen



23. Apr 2019: Deutliche Verbesserung der peristomalen Haut nach 2-wöchiger Verwendung der planen eakin dot® 2-Teiler

Outcome:

- **23. April 2019:** Stoma nicht mehr undicht.
- Besserung der peristomalen Hautprobleme.
- **21. Mai 2019:** Höheres Komfortgefühl und besserer Zustand der peristomalen Haut.
- Patient möchte eakin dot® plane 2-Teiler weiterverwenden.

Klinische Evidenz für die Wahl der planen eakin dot® 2-Teiler:

- *skinsmart™* Hydrokolloid für längere Lebensdauer bietet klinisch nachgewiesene höhere Sicherheit, längere Tragezeit und bessere Hautfreundlichkeit im Vergleich zu anderen getesteten 2-teiligen Hydrokolloid-Systemen¹

Der Patient im Fallbericht wurde durch eine Stomatherapeutin untersucht und beraten.

ED2PC/CS10 (DE)