

*Die Patientin in diesem Fallbericht wurde von einer Stomatherapeutin unterstützt und beraten.

3 Vorteile:

1. Vermeidung von Leckagen¹
2. Höherer Komfort^{1,2}
3. Längere Tragezeit von bis zu 3 Tagen¹

Fallbericht eingereicht von: Dominique Pautard, Stomatherapeutin, Centre Hospitalier d'Ardèche Nord, Frankreich



Krankengeschichte:

- 89-jährige Frau
- Dezember 2021: Hartmann-Operation mit endständigem Kolostoma nach akuter Sigmaperforation

Probleme:

- Nach der Operation wurde zunächst eine plane Basisplatte verwendet, bei der es diverse Leckageprobleme gab.
- Das plane System musste 3-4 Mal täglich gewechselt werden.

Lösung:

- Die Verwendung eines flexi-konvexen Systems wurde für geeigneter gehalten, denn das Stoma befand sich fast auf Hautniveau und es gab zusätzlich Hautfalten.



Vor eakin dot®



Nach der Verwendung von eakin dot® 2-Teiler

Erfolg mit dem flexi-konvexen eakin dot® 2-Teiler:

- Die Stomatherapeutin empfahl die flexible Konvexität des eakin dot® 2-Teilers mit einem Ausstreifbeutel.
- Die regelmäßige Stomaversorgung wurde zur Vermeidung von Leckagen um die eakin **Cohesive**® Hautschutzpaste ergänzt.
- Mit dem flexi-konvexen eakin dot® 2-Teiler ist nun eine Tragezeit von 48 bis 72 Stunden ohne Leckage möglich.

Klinischer Hintergrund für die Wahl des flexi-konvexen eakin dot® 2-Teilers:

- Aus klinischen Daten geht hervor, dass der *skinsmart*™ Hydrokolloid für mehr Sicherheit, eine längere Tragezeit sowie besseren Hautschutz sorgt als andere marktführende Stomabeutel.²
- Die flexi-konvexe Hautschutzfläche bietet eine höhere Stabilität um das Stoma herum als andere 2-teilige Systeme.²