

eakin dot®

2-teiliges planes System
mit 80-mm-Ring

Wählen Sie den
planen eakin
dot® 2-Teiler bei
empfindlicher
Haut

3 Gründe, die dafürsprechen:

1. Höheres Maß an Patientensicherheit, Selbstvertrauen und Komfort^{1,2}
2. Hautfreundlicher *skinsmart™* Hydrokolloid für längere Tragezeit^{1,2}
3. Deutliche Verbesserung des peristomalen Hautzustandes^{1,2}

Fallbericht von:

Marieke Muller, Stomatherapeutin,
Tergooi-Spital, Hilversum, Niederlande

1. Anwenderberichte zu eakin dot® 2-teiliger Stomaversorgung. Daten liegen vor. 2017-2019
2. Fallbericht von Stomatherapeut zu eakin dot® 2-teiliger Stomaversorgung. Daten liegen vor. 2019

eakin dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE

Krankengeschichte:

- **13. März 2019:** Akute Rektosigmoidresektion mit endständiger Kolostomie nach Sigmoidperforation (Tumor).
- Sehr grosses postoperatives Stoma.
- Patient mit 2-teiligem Klebesystem und geschlossenem Beutel ins Pflegeheim entlassen.

Probleme/Einschätzung der Pflegekraft:

- **29. März 2019:** Patient kam mit **überempfindlicher**, stark exkorierter Haut ins Krankenhaus. Entfernung der Basisplatte mit **Pflasterentferner** aufgrund von Hautablösungen und Blasen.
- Verkleinerung des Stomas – Wechsel zu kleinerem 2-teiligem System
- Blasen mit Puder behandelt. Anbringung von Flange-Extender am Rand der Basisplatte.
- Entlassung ins Pflegeheim. Empfehlung, die Basisplatte 3-mal wöchentlich und den geschlossenen Beutel 1-Mal täglich zu wechseln. Erneute Beurteilung nach 1 Woche.
- **2. April 2019:** **Schmerzhafte** offene Haut mit Blasen. Undichte Stellen links und rechts unter der Basisplatte. Basisplatte wurde 4 Tage lang getragen. Beutel wurde einmal täglich gewechselt.



Pflegekraft empfiehlt den eakin dot® 2-Teiler:

- **2. April 2019:** Im Krankenhaus wird dem Patienten ein Wechsel zu den planen eakin dot® 2-Teilern mit 80-mm-Ring, eakin Cohesive® StomaWrap und Flange-Extender auf der rechten Seite empfohlen. Verwendung von austreibbarem Beutel wegen dünnflüssiger Ausscheidungen. Mit Empfehlung zum Wechseln der Basisplatte **2-mal pro Woche** und Fortsetzung des täglichen Beutelwechsels ins Pflegeheim entlassen.
- **5. April 2019:** Wechsel der Basisplatte im Pflegeheim – Beutel werden täglich gewechselt und tagsüber geleert.



Ergebnis:

- **8. April 2019:** **Deutliche Verbesserung der peristomalen Haut.**
- **9. April 2019:** Besuch im Krankenhaus. Patient kann **Basisplatte eigenständig** mit Pflasterentferner-Spray wechseln und berichtet über **nachlassende Schmerzen.**
- **12. April 2019:** Wechsel der Basisplatte im Pflegeheim.
- **15. April 2019:** Rückkehr zur Verwendung von geschlossenen Beuteln, Wechsel 1- bis 2-mal pro Tag. 2 Wochen nach Umstellung auf die planen eakin dot® 2-Teiler keine Undichtigkeiten mehr, Ausscheidungen sind dicker, und Haut ist abgeheilt.



Klinische Evidenz für die Wahl des eakin dot® 2-teiligen planen Systems:

- Längere Lebensdauer von *skinsmart™* Hydrokolloid bietet klinisch erwiesene höhere Sicherheit, längere Tragezeit und höhere Hautfreundlichkeit im Vergleich zu anderen getesteten 2-teiligen Hydrokolloid-Systemen.¹

Der Patient im Fallbericht wurde durch eine Stomatherapeutin untersucht und beraten.

ED2PC/CS11 (DE)