

# Die richtige Lösung für komplexe Stomata: die eakin dot® 1-Teiler\*



Fallbericht eingereicht von:  
Irene de Groot, Krankenpflegerin,  
Langeland-Krankenhaus,  
Zoetermeer, Niederlande

**\*Der Patient in diesem Fallbericht wurde von einer Stomatherapeutin unterstützt und beraten.**

## 4 Vorteile:

1. Längere sichere Tragedauer, hilft beim Vermeiden von Leckagen<sup>1,2</sup>
2. Geringerer Zeitaufwand für den Beutelwechsel<sup>1,2</sup>
3. Verbesserung des peristomalen Hautzustands<sup>1,2</sup>
4. Bessere Lebensqualität<sup>1,2</sup>

## Krankengeschichte:

- 53-jähriger Mann, Gabelstaplerfahrer
- 2011: Magenbypass-OP
- 2017: ultratiefe anteriore Rektumresektion aufgrund eines großen villösen Adenoms im Rektum
- 2018: Anastomoseninsuffizienz
- 2019: ausgeprägte Anorektalfistel
- 2020: Anlegen eines endständigen Ileostomas und Analfistel-Operation

## Probleme:

- Große parastomale Hernie.
- Erhebliche Gewichtsabnahme nach dem Magenbypass. Der BMI ist noch hoch, aber der Patient stellt seine Ernährung und Lebensweise um.
- Komplexes Stoma auf Hautniveau, 50 mm, mit vielen Hautfalten und Unebenheiten.
- Der Patient probierte erfolglos 1- und 2-teilige Produkte verschiedener Marken aus.
- Leckagen bis zu viermal pro Woche, was zu einer peristomalen Hautschädigung führte. Da der Patient aufgrund seiner körperlichen Verfassung und der Lage des Stomas auf Hilfe beim Versorgungswechsel angewiesen ist, ist es besonders wichtig, Leckagen unter Kontrolle zu halten.



## Erfolg mit dem planen eakin dot 1-Teiler:

- Wechsel zum planen eakin dot® 1-Teiler (mit eakin **Cohesive**® Hautschutzpaste zum Ausgleichen von Hautunebenheiten/Falten, alkoholfrei, daher keine Hautreizung).
- Nur noch ein Versorgungswechsel am Tag.
- Leckagen werden vermieden und die peristomale Haut ist wieder intakt.
- Verbesserung der Lebensqualität – die Stomaversorgung ist unter Kontrolle.



Mit dem eakin dot® 1-Teiler



„Das Leben ist so viel leichter und sorgloser.“ Irene de Groot

## Klinischer Hintergrund für die Wahl des planen eakin dot® 1-Teilers:

- Aus klinischen Daten geht hervor, dass der *skinsmart*™ Hydrokolloid für mehr Sicherheit und eine längere Tragezeit sorgt als andere verfügbare Hydrokolloide.<sup>2</sup>
- Passt sich gut an peristomale Hautunebenheiten und Falten an.