

Erfolg mit dem eakin dot® 1-Teiler und passendem Zubehör mittels Fernanleitung*



Fallbericht eingereicht von:
Laetitia Quesnault,
Hôpital Tenon, Paris

****Die Patientin in diesem Fallbericht wurde von einer Stomatherapeutin unterstützt und beraten.**

4 Vorteile:

1. Längere sichere Tragedauer, hilft beim Vermeiden von Leckagen^{1,2}
2. Geringerer Zeitaufwand für den Beutelwechsel^{1,2}
3. Verbesserung des peristomalen Hautzustands^{1,2}
4. Bessere Lebensqualität^{1,2}

Krankengeschichte:



- Frau V., Morbus Crohn seit 1996, Stomaanlage 2001
- Stoma auf Hautniveau
- Parastomale Hernie
- Leichtes Übergewicht
- Trockene Haut

Probleme, die zur Empfehlung von eakin dot® geführt haben:

- Diverse Empfindlichkeiten gegenüber Stomabeuteln mit wiederholten Leckagen, was zu einer zunehmenden Schädigung der peristomalen Haut führte. Die Patientin hatte zuvor Beutel und Fixierstreifen verschiedener Marken ausprobiert.
- Frau V. kehrte in die französischen Überseegebiete zurück, von wo aus alle Folgetermine per Videoanruf durchgeführt wurden.
- Die Stomatherapeutin empfahl einen konvexen eakin dot® 1-Teiler in Maxi-Größe sowie einen eakin dot® 2-Teiler, da die Patientin gerne abwechseln wollte.

Erfolg mit eakin dot®:

- Nach nur 7 Tagen mit eakin dot® sieht die peristomale Haut viel besser aus. Es kommt jedoch noch immer zu einigen Leckagen, so dass der Patientin anhand von Schaubildern und per Fernanleitung erklärt wird, wie sie die eakin Cohesive® Hautschutzpaste anwenden kann (Abb. A).
- 12 Tage später ist eine erhebliche Verbesserung des Hautzustands zu sehen. Zwei kleine Hautreizungen sind jedoch noch vorhanden und die Stomatherapeutin empfiehlt (erneut mittels Videokonferenz) an diesen Stellen die Anwendung von eakin Cohesive® Hautschutzplatten (Abb. B). Innerhalb von Tagen sind auch diese gereizten Bereiche verheilt. Abb. A
- 3 Monate später reiste Frau V. zu ihrer Weiterbehandlung nach Frankreich zurück. Es kommt nicht mehr zu Leckagen und ihre Haut hat sich regeneriert. Die Haut ist noch etwas trocken, so dass ein eakin Cohesive® Hautschutzring empfohlen wurde (Abb. C).
- Frau V. ist begeistert von den eakin dot® Stomabeuteln und benutzt nun auch eakin Contour™ Fixierstreifen für zusätzliche Sicherheit beim Schwimmen.

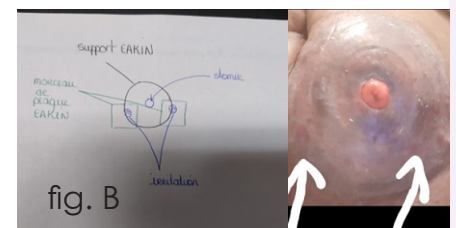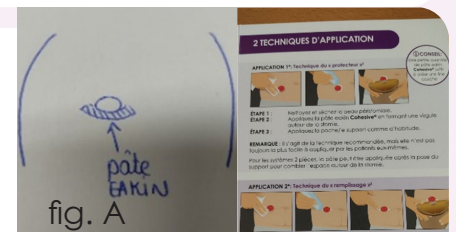

Klinischer Hintergrund für die Wahl des eakin dot® 1-Teilers:

- Aus klinischen Daten geht hervor, dass der *skinsmart*™ Hydrokolloid für mehr Sicherheit und eine längere Tragezeit sorgt als andere verfügbare Hydrokolloide.²
- Er passt sich gut an peristomale Hautunebenheiten und Falten an.²