

# eakin dot® 2-Teiler in der Praxis: Chronische peristomale Hautulzeration\*

\*Die Patientin wurde nach langanhaltender Ulzeration mit einem 1-Teiler von einer Stomatherapeutin unterstützt

**Fallbericht eingereicht von:** Laura Han, Stomatherapeutin, Haaglanden Medisch Centrum, Leidschendam, Niederlande

## 4 Vorteile:

1. Der hautfreundliche Hydrokolloid verlängert die Tragezeit und hilft bei der Verbesserung des peristomalen Hautzustands.
2. Der aufklappbare violette Rastring verringert den Druck, der beim Versorgungswechsel auf den Bauch ausgeübt wird.
3. Die Basisplatte passt sich mit ihrer Blütenform der Hernie an.
4. Benutzerfreundlich in der Anwendung.

## Patientengeschichte:

- 68-jährige Frau
- Okt. 2006: Tiefe anteriore Rektumresektion aufgrund eines Rektumkarzinoms. Anlage eines endständigen Kolostomas nach Anastomoseninsuffizienz
- Stoma auf Hautniveau und parastomale Hernie. Trägt eine Stomabandage

## Probleme:

- Eine Leckage aus dem planen 1-teiligen Beutel führte zu einer Schädigung der peristomalen Haut.
- 2017: Behandlung der Hypergranulation mit Silbernitrat - leichte Verbesserung.
- Wechsel zu einem konvexen 1-Teiler. Es bildeten sich Geschwüre, die schlimmer wurden.
- Diverse topische Behandlungen über 2 Jahre. Keine Verbesserung des Hautzustands.
- Feb. 2019: Überweisung in die Dermatologie (weder Biopsie noch Allergietests ergaben eine medizinische Ursache).
- Weiterhin topische Behandlung mit Kortikosteroiden. Keine Verbesserung.
- Dez. 2019: Überlegung, ob möglicherweise die Handhabung des 1-teiligen Systems durch die Patientin für die Verschlimmerung des Problems verantwortlich sein könnte. Die Patientin wurde nochmals an die Stomatherapeutin überwiesen.
- Dreimal täglicher Wechsel des 1-teiligen Stomabeutels.

## Erfolg mit dem eakin dot® 2-Teiler:

- Dez. 2019: Die Stomatherapeutin empfahl den planen eakin dot® 2-Teiler (um den Druck auf die Ulzeration zu verringern) sowie einen eakin Cohesive SLIMS® Hautschuttring.
- Erheblicher Rückgang der täglichen Basisplattenwechsel auf nur noch dreimal wöchentlich.
- Jan. 2020: Abheilen der Geschwüre.
- Juli 2020: Leichte Verschlechterung des peristomalen Hautzustands aufgrund einer unterwanderung der planen Basisplatte - Wechsel zum flexi-konvexen eakin dot® 2-Teiler.



Vor eakin dot®



Nach der Anwendung des planen eakin dot® 2-Teilers



Flexi-konvexer eakin dot® 2-Teiler

## Klinischer Hintergrund für die Auswahl des flexi-konvexen eakin dot® 2-Teilers:

- Aus klinischen Daten geht hervor, dass der *skinsmart*™ Hydrokolloid für mehr Sicherheit und eine längere Tragezeit der Stomabeutel sorgt sowie hautfreundlicher ist als<sup>1</sup>