

Fallbericht eingereicht von: D. de Winter, regionale Stomatherapeutin, MediReva, Maastricht, Niederlande

2 Vorteile:

1. Längere Tragezeit der Stomabeutel^{1,2}
2. Mehr Sicherheit und Komfort^{1,2}

Krankengeschichte:

- 60-jähriger Mann
- Ileostoma > 30 Jahre wegen Colitis ulcerosa
- Proktokolektomie
- Verwendung eines 2-teiligen Systems (geschlossen und austreifbar) ohne Filter wegen früherer Leckagen durch den Filter
- Ursprüngliche Stomaform, kein Prolaps
- Unebenheiten um das Stoma herum

Probleme:

- Häufige Leckagen an der linken Unterseite der Basisplatte, was zu ständigen Beutelwechseln und Beschwerden führt
- 3-4 Basisplattenwechsel pro Woche
- 2 Beutelwechsel am Tag und 1-2 Beutelwechsel in der Nacht
- Ablösen der Ränder an der Leckagestelle und Juckreiz unter der Basisplatte
- Patient versuchte eine andere Marke (2-teiliges System), aber die Basisplatte löste sich an der gleichen Stelle ab

Erfolg mit dem flexi-konvexen eakin dot® 2-Teiler:

- Keine Leckagen mehr und keine Leckage durch den Filter
- Deutlich seltenere Versorgungswechsel, so dass auch deutlich weniger Material im Monat verbraucht wird:
 - ▶ 1-2 Basisplattenwechsel pro Woche
 - ▶ 1 Beutelwechsel am Tag
- Kein Juckreiz und kein Ablösen der Ränder
- Die Basisplatte bleibt sicher an ihrem Platz, sogar nach dem Duschen
- Der Patient mag den violetten Rastring und die leichte Reinigung
- Sehr zufrieden



Klinischer Hintergrund für die Wahl des flexi-konvexen eakin dot® 2-Teilers:

- Aus klinischen Daten geht hervor, dass der *skinsmart™* Hydrokolloid für mehr Sicherheit, eine längere Tragezeit sowie besseren Hautschutz sorgt als andere marktführende Stomabeutel¹
- Die flexi-konvexe Hautschutzfläche bietet mehr Komfort und Stabilität um das Stoma herum¹