

Entscheiden Sie sich für den 2-Teiler von eakin dot® bei peristomalen Hautproblemen

4 Gründe dafür:

1. Die Wahl der richtigen Versorgung ist ein wichtiger Aspekt bei der generellen Erholung eines Menschen nach einer Stoma-OP.¹
2. Das Ziel sowohl der Pflegefachperson als auch des Patienten ist es, eine vorhersehbare, zuverlässige Tragezeit zu erreichen.²
3. Peristomale Hautirritationen sind eine sehr häufige Frühkomplikation bei der Behandlung eines Stomas.
4. Peristomale Hautprobleme können mit dem entsprechenden Beutelsystem korrigiert werden.^{3,4}

Fallstudie eingereicht von:

Bataa EL-Erakey, Stomaschwester, Australien

References:

1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. *BJN* 19(17): s6-15 2. *Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN)*. (2013) *Colostomy and Ileostomy: Products and tips*. Mt. Laurel, NJ: WOC 3. *Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN)*. (2016) *Peristomal skin complications: Best practice for clinicians*. 4. Hooper J (2018) *Ostomy: Choosing the Right Appliance*. Wound Care Education Institute www.woundcentral.com

Krankengeschichte:

- Herr PF hatte ein Rektumkarzinom
- Abdominoperineale Rektumresektion mit Bildung einer Endkolostomie
- Entlassung aus dem Krankenhaus mit einem 1-teiligen konvexen, entleerbaren Beutel

Probleme:

- Wechselnder Stuhlgang von weich bis fest
- Schwierig, den Beutel auszustreifen, wenn die Stuhlkonsistenz fest ist
- Zu viele Beutelwechsel bei weicher Stuhlkonsistenz
- Auftritt von Leckagen
- Entwickelte peristomale Hautabschürfungen



Bericht Pflegefachperson

- Peristomale Haut **abgeschürft**
- Fühlt sich **unwohl**
- **Leckagen**, aufgrund von unvorhersehbarer Stuhlausscheidung
- **Schwierigkeiten** bei der genauen Platzierung des 1-Teilers



Die Pflegefachperson empfiehlt den 2-Teiler von eakin dot®:

- Flexible Beuteloptionen, um die unterschiedlichen Stuhlkonsistenzen aufzufangen
- Der *skinsmart*™ Hydrokolloid verlängert die Tragezeit
- Die **leichte, präzise** Platzierung der Basisplatte **verringert peristomale Hautprobleme** und **verhindert Leckagen**



Ergebnis:

- Die peristomale Haut **verbesserte sich**
- **Keine Leckagen**
- **Benutzerfreundlichkeit**
- **Kann je nach Stuhlkonsistenz** zwischen geschlossenen und austreifbaren Beuteln **wechseln**

Klinischer Beweis für die Wahl des 2-Teilers von eakin dot®:

- **Verbessert peristomale Hautprobleme**
- **Benutzerfreundlichkeit**
- *skinsmart*™ Hydrokolloid für eine längere Tragezeit
- **Erfüllt die individuellen Bedürfnisse** von Stomaträgern

Entscheiden Sie sich für den 2-Teiler von eakin dot® nach einer parastomalen Hernien-Operation

4 Gründe dafür:

1. Die Wahl der richtigen Versorgung ist ein wichtiger Aspekt bei der generellen Erholung eines Menschen nach einer Stoma-OP.¹
2. Das Ziel sowohl der Pflegefachperson als auch des Patienten ist es, eine vorhersehbare, zuverlässige Tragezeit zu erreichen.²
3. Parastomale Hernien sind eine der häufigsten Komplikationen, die von Stomaträgern gemeldet werden.³ Das Auftreten liegt bei 25 bis 50 %.⁴
4. Die postoperative Genesung ist bei einigen Stomaträgern nicht immer einfach, da sie aufgrund des postoperativen Schmerzes und des Wundmanagements einen Produktwechsel benötigen.

Fallstudie eingereicht von:

Felicity Rackham / Liz Meakin
Pflegeberaterinnen bei der
Stomatherapie, Epworth Eastern Hospital,
Australien

References:

1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOCN 3. Burch J, 2018 Nursing strategies for the prevention and management of parastomal hernias. Gastrointestinal Nursing 16(2) 38-42 4. Thompson MJ, Trainor B (2005) Incidence of parastomal hernia before and after a prevention programme 3(2):23-27

Krankengeschichte:

- Frau A. – 73-jährige Frau unterzog sich einer grossen Parakolostomalhernien-OP
- Diese Dame wollte nach der OP ihr bisheriges 2-teiliges konvexes System verwenden, da es ihr vertraut und komfortabel für sie war


Probleme:

- Anhaltende Beschwerden auf der linken Seite des Stomas deuteten darauf hin, dass die Konvexität Druck auf das innere Netz ausübte
- Leckagen traten aufgrund der unebenen Fläche ihres umgestalteten Stomas auf



Bericht Pflegefachperson:

- Hautschäden um das Stoma
- Leichte Blutergüsse und empfindliche Haut, die von dem konvexen Flansch herrühren
- Anzeichen einer medizinischen Hautschädigung durch Entfernen von Klebstoff entlang der Flanschecken, aufgrund eines häufigen Systemwechsels

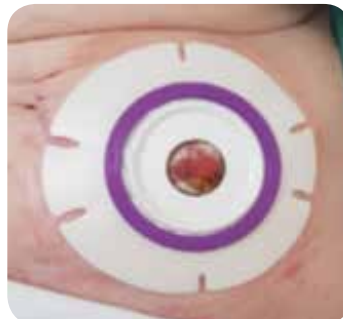

Die Pflegefachperson empfiehlt den 2-Teiler von eakin dot®:

- Weniger Schmerzen und Blutergüsse auf der seitlichen Netzseite
- Frau A. fühlte sich wohl, dieses System zuhause anzuwenden



Ergebnis:

- 2 Wochen nach Verwenden des 2-Teilers von eakin dot® mit der Hautschutzpaste unter der Basisplatte berichtete Frau A., dass sich die Haut viel besser anfühle
- Die Haut heilte im Verlauf der nächsten Wochen weiter

Klinischer Beweis für die Wahl des 2-Teilers von eakin dot®:

- Verbessert peristomale Hautprobleme
- Benutzerfreundlichkeit
- *skinsmart*™ Hydrokolloid für eine längere Tragezeit
- Erfüllt die individuellen Bedürfnisse von Stomaträgern

Entscheiden Sie sich für den 2-Teiler von eakin dot®: Aus der Perspektive eines Betreuers

4 Gründe dafür:

1. Die Wahl der richtigen Versorgung ist ein wichtiger Aspekt bei der generellen Erholung eines Menschen nach einer Stoma-OP.¹
2. Das Ziel sowohl der Pflegefachperson als auch des Patienten ist es, eine vorhersehbare, zuverlässige Tragezeit zu erreichen.²
3. Wenn Unabhängigkeit nicht möglich ist, kann die Stomaversorgung von einem Angehörigen oder einer medizinischen Fachperson übernommen werden. Viele Pflegekräfte sorgen sich um das Entfernen der Stomaversorgung, weil sie das Gefühl haben, dass es dabei zu Schäden an der peristomalen Haut kommen kann.³
4. Der eakin dot® 2-Teiler erfüllt die Bedürfnisse von Stomaträgern und Betreuern.

Fallstudie eingereicht von:

Kate Slattery,
Pflegeberaterin,
TG Eakin Ireland

References:

1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): 56-15
2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOCN 3.
Black P (2011) The role of the carer and patient in stoma care. Nursing and Residential Care 13(9) 432-436

Krankengeschichte:

- 80-jähriger verheirateter Herr
- Bei Herrn S. wurde im Januar Darmkrebs diagnostiziert
- Vordere Darmresektion und Bildung eines endständigen Stomas
- Postoperative Komplikationen führten zu einer verzögerter Genesung und einer verzögerten Entlassung einen Monat nach der Operation
- Herr S. ist bei der Entleerung des Beutels unabhängig, benötigt jedoch die volle Unterstützung seiner Frau beim Beutelwechsel



Bericht Pflegefachperson:

- Ursprünglich verwendete Herr S. einen weichen konvexen Beutel ohne Hautschutzpaste
- Es wurde Herrn S. und seiner Frau geraten, den Beutel alle 2-3 Tage zu wechseln. Aber es kam häufiger vor, dass er erst alle 5 Tage gewechselt wurde
- **Leckagen und Hautirritationen traten auf**

Die Pflegefachperson empfiehlt den 2-Teiler von eakin dot®:

- Versuch mit dem 2-Teiler von eakin dot® mit der **Cohesive SLIM®** Hautschutzpaste von eakin
- Innerhalb von zwei Wochen ist die Haut beinahe **vollständig abgeheilt**
- **Keine Leckagen** erlebt
- Herr S. und seine Frau wechseln die Basisplatte alle 4-5 Tage und den Beutel täglich

Ergebnis:

- Sobald Frau S. mit dem ‚KLICK‘ vertraut war, konnte sie den Beutel mit der Basisplatte **bequem** und **sicher** koppeln
- Sie sind jetzt **sehr zufrieden** damit, wie gut der 2-Teiler von eakin dot® funktioniert und finden ihn **sehr sicher, bequem und einfach zu bedienen**

Klinischer Beweis für die Wahl des 2-Teilers von eakin dot®:

- Verbessert peristomale Hautprobleme
- Benutzerfreundlichkeit
- **skinsmart™** Hydrokolloid für eine längere Tragezeit
- Erfüllt die individuellen Bedürfnisse von Stomaträgern

eakin dot®

Entscheiden Sie sich für den 2-Teiler von eakin dot®, um langfristige Gesundheitsprobleme, die mit einem Stoma einhergehen, zu bewältigen

4 Gründe dafür:

1. Die Wahl der richtigen Versorgung ist ein wichtiger Aspekt bei der generellen Erholung eines Menschen nach einer Stoma-OP.¹
2. Das Ziel sowohl der Krankenschwester als auch des Patienten ist es, eine vorhersehbare, zuverlässige Tragezeit zu erreichen.²
3. Ein langfristiges Gesundheitsproblem kann einen erheblichen Einfluss auf die Fähigkeit eines Menschen haben, ein normales Leben zu führen.³
4. Langfristige Gesundheitsprobleme können die Fähigkeit eines Menschen beeinträchtigen, die eigene Versorgung selbstständig zu verwalten. Es gibt sorgfältige Überlegungen hinsichtlich der spezifischen Bedingung und der einzelnen Beschränkungen bei der Empfehlung eines angemessenen Produktes, um die optimale Selbstversorgung, das Management und die Unabhängigkeit für die Stomaträger zu fördern.³

eakin dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE

Patientengeschichte:

- 75 Jahre alter Herr mit eingeschränkter Mobilität, der allein wohnt
- Diagnose Rektumkarzinom
- Abdominoperineale Rektumresektion mit Bildung der Endkolostomie
- Vorgeschichte einer chronischen Krankheit einschliesslich Parkinson-Krankheit, bipolare Störung, Bluthochdruck, Aortenstenose und Arthrose



Die Pflegefachperson empfiehlt den 2-Teiler von eakin dot®:

- Die Stomatherapeutin beurteilte die individuelle Fähigkeit und empfahl den 2-Teiler von eakin dot® 2-teilig **unmittelbar nach der OP**
- Überprüfter Patient 3 Wochen nach der Operation

Bericht Pflegefachperson:

- Er meldet **keine Leckagen** mit dem 2-teiligen System von eakin dot®
- Das hatte einen **erheblichen positiven Einfluss** auf den Aufbau seines **Selbstvertrauens**
- Die peristomale Haut ist gesund
- Selbstverwaltung seiner Stoma-Pflege und Versorgung
- Er muss nur alle 3-4 Tage die Basisplatte wechseln
- Er sagt, dass er „**seine Beutel liebt**“ und das **einfache Kopplungssystem** besonders mag, weil er beim Anbringen des Beutels den ‚**Klick**‘ hören kann



Ergebnis:

- Er kommt **sehr gut zurecht, ohne Probleme oder Leckagen**
- Das Stoma bleibt **rot und bündig** zu seiner Haut, 30 mm rund
- Die peristomale **Haut ist intakt**
- Trotz seines zunehmenden Tremors durch seine Parkinson-Krankheit kann er den **Beutel auf der Basisplatte mit Leichtigkeit ausrichten**

Klinischer Beweis für die Wahl des 2-Teilers von eakin dot®:

- **Verbessert peristomale Hautprobleme**
- **Benutzerfreundlichkeit**
- **skinsmart™** Hydrokolloid für eine **längere Tragezeit**
- **Erfüllt die individuellen Bedürfnisse** von Stomaträgern

Fallstudie eingereicht von:

Kelly Vickers,
Stomatherapeutin,
Lyell McEwin Krankenhaus,
Adelaide,
Südaustralien

References:

1. Williams J, Gwilliam B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Iley H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. *BJN* 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) *Colostomy and Ileostomy: Products and tips*. Mt. Laurel, NJ: WOC 3. Reading L (2014) *Practical guidance for nurses caring for patients with long-term conditions*. *British Journal of Community Nursing*21(2) 90-98